



## Cryolipolyse - la réduction permanente des dépôts gras par le froid

### La société en transition : de Davide de Michelangelo à Armani et retour

Dans le passé, comme aujourd'hui, la mode a eu un statut très élevé dans certains milieux. Les termes « les vêtements font l'homme » et « avoir de beaux draps » sont aussi vieux que le tissu lui-même. L'emballage était/est parfois plus important que le contenu lui-même ! Il n'est pas rare que les gens se définissent eux-mêmes par elle. De plus, le rang et la prospérité étaient marqués par un corps bien nourri. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire : le corps sain doit être aussi mince et bien entraîné que possible. Bien que la mode soit restée la même, la relation à son propre corps a radicalement changé. Une nouvelle tendance qui mène à une alimentation saine et un exercice accru se répand. Il ne s'agit donc plus seulement d'une question d'emballage - le contenu a repris de l'importance. Mais de toute évidence, l'augmentation de l'exercice et les régimes alimentaires n'ont pas toujours l'effet rapide et désiré. Nous traiterons le problème directement avec vous. Discret et efficace.

### Pour la femme moderne et pour l'homme éclairé

Aujourd'hui, on investit beaucoup dans sa propre apparence (temps, argent, renoncements, efforts, etc.). Cela ne se fait pas seulement pour les autres, mais beaucoup plus « parce que je le vaudrais bien » pour moi-même. Et c'est une bonne chose, car ce comportement renforce notre confiance en nous-mêmes et augmente notre réputation dans la société. Et il ne s'agit pas seulement de l'extérieur. Selon la situation, de nombreux problèmes peuvent être résolus avec elle. Chez la femme, l'homme et même chez les enfants. En plus de la nutrition et de l'exercice, on peut faire encore plus. Par exemple, avec la cryolipolyse dans laquelle les taches grasses gênantes sont "gelées" de manière ciblée et contrôlée. La réduction des coussinets de graisse reste une éternelle actualité esthétique. Dans le domaine de la beauté médicale, il existe de nombreuses possibilités invasives et non invasives - mais jamais auparavant une procédure n'a été aussi prometteuse que la cryolipolyse. Les experts s'accordent à dire que la cryolipolyse est la méthode non invasive la plus efficace pour la réduction permanente des dépôts gras.

### Cryolipolyse

La technologie du refroidissement des tissus pour l'élimination sélective des cellules grasses sans endommager la peau ou les tissus environnants est basée sur le fait que les cellules grasses réagissent de manière plus sensible aux stimuli du froid que les autres structures tissulaires. La tête de traitement munie d'un réceptacle en silicone souple crée un vide doux massant et tire le tissu cutané vers les panneaux de refroidissement. De manière contrôlée et ciblée, le froid est libéré par la surface de la peau vers les coussinets gras indésirables. Les cellules grasses réagissent au froid par un processus de dégradation naturelle qui dure de 8 à 12 semaines et permet une réduction visible de la couche grasse. Le traitement est indolore et peut comprendre 1 à 3 traitements individuels à des intervalles de 4 à 5 semaines. Durée par séance 70 minutes.





La cryolipolyse est une solution optimale pour les personnes en bonne santé ayant un comportement nutritionnel et physique normal, mais avec des coussinets graisseux locaux qui ne sont pas trop gros et qui ne répondent pas aux régimes ou aux sports. Cependant, toutes les personnes ne réagissent pas de la même façon au traitement. Le taux de réussite est d'environ 80%. La cryolipolyse ne convient pas aux personnes en surpoids qui veulent perdre du poids. Il ne s'agit que de la réduction locale des cellules graisseuses dans certaines zones problématique. Sans douleur, sans risque et sans indisponibilité. Afin d'obtenir un effet optimal, deux appareils high-techs et huit applicateurs ont été développés, qui prennent en compte tous les types de peau. L'entreprise de fabrication Zimmer Medizin Systeme, qui a également fabriqué notre chambre froide, est également un leader dans ce domaine.

Avant et après la thérapie, la zone à traiter est traitée par AWT ondes de choc radiales (unique et seulement chez nous !). De cette façon, les tissus peuvent être préparés de manière optimale et l'effet peut être considérablement augmenté. Toutes les activités peuvent être reprises immédiatement après le traitement. On peut s'attendre à ce qu'en une seule séance, plus d'un tiers de la couche graisseuse soit éliminée. Trois séances sont recommandées pour de meilleurs résultats. Afin d'augmenter l'efficacité, la CCE (thérapie par le froid du corps entier) est également recommandée. Ceci n'est possible que chez nous, dans le Polarior (supplément de prix). Enfin, nous recommandons de compléter l'ensemble du processus de traitement par une alimentation équilibrée et pas trop stricte et d'autres activités supplémentaires.

Les types de peau des femmes et des hommes sont très différents. Le tissu conjonctif féminin est moins tendu, la peau est plus douce et produit moins de sébum. La peau des hommes, cependant, est plus épaisse, contient plus de mélanine et est généralement mieux alimentée en sang. De plus, les fibres de maintien sont disposées différemment et offrent donc plus de tenue. Nous ne traitons que la graisse extra-abdominale (pas de ventre de bière !). Nous aimerions également aider les enfants et les adolescents en surpoids à introduire des changements. C'est important, car ce problème accompagne souvent les adolescents tout au long de leur vie. Souvent avec une mauvaise conséquence psychosomatique. En règle générale, les filles à partir de 16 ans et les garçons à partir de 19 ans sont traités. Dans des cas exceptionnels et en accord avec les parents, un traitement plus précoce est également possible.

#### Les femmes


Tel qu'illustré : Partie supérieure de l'abdomen, partie inférieure de l'abdomen, partie supérieure des bras, hanches, cuisses, fesses, culotte, double menton, (resserrement de la peau du visage en préparation), etc.

#### Les hommes

Tel qu'illustré : Base abdominale, hanches (Love-Handels), extrémités des seins, double menton, (resserrement de la peau du visage et dysfonction érectile en préparation), etc.

#### Les enfants

En consultation avec les parents et selon un plan de mouvement thérapeutique fixe.

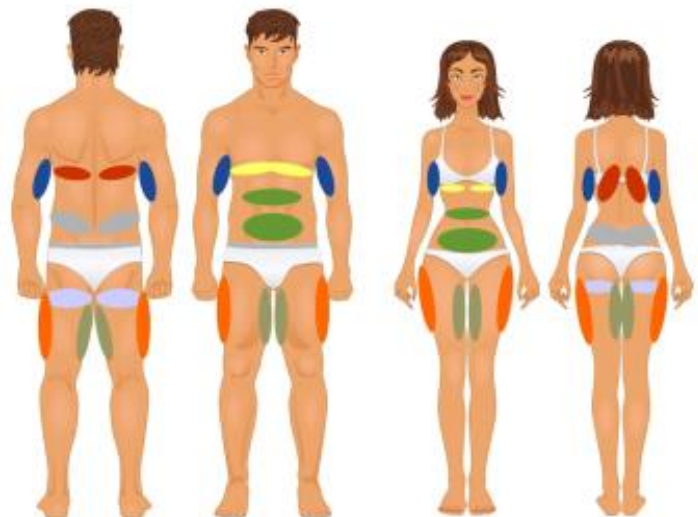




### Procédé de traitement

La méthode à froid est une nouvelle méthode non invasive pour éliminer en douceur et avec succès la graisse de certaines parties du corps. Dans les zones traitées, cela conduit à une réduction significative et d'apparence naturelle de la graisse. Les cellules graisseuses des coussinets graisseux sont éliminées par un processus graduel qui n'endommage pas les tissus environnants. Pas d'aiguilles et pas d'incisions. Un applicateur non invasif est placé sur la peau pour refroidir et éliminer les cellules graisseuses dans certaines zones du corps d'une manière précise et contrôlée. Les cellules graisseuses exposées au processus de refroidissement initient un processus d'élimination naturelle des cellules. Dans la zone traitée, les cellules graisseuses sont progressivement dégradées par le métabolisme (tout comme la graisse contenue dans l'aliment). Il en résulte une réduction des dépôts de graisse. Veuillez comprendre que nous ne traitons que des personnes en bonne santé (au sens des contre-indications énumérées). En cas de doute, le traitement sera refusé. Veuillez consulter votre médecin de famille si vous avez des inquiétudes ou si vous avez des problèmes. Chez nous, la santé passe avant la beauté ! Avant le premier traitement, il est précisé si le traitement par le froid permet d'obtenir le succès souhaité. Le pré-traitement et le post-traitement ainsi que les risques, les effets secondaires et le processus et le prix exacts du traitement sont discutés et confirmés par une déclaration de consentement écrite.

### Le traitement

Les zones de traitement sont définies, photographiées et dessinées en position debout. Suit maintenant la mesure avant avec un ruban à mesurer pour mesurer la circonférence du corps. Toutes les données de mesure et les images avant et après sont enregistrées avec l'empreinte optique globale pour déterminer le succès du traitement. Conseil : Les vêtements préférés (pantalon, chemise, robe, etc.) peuvent être très utiles pour déterminer le traitement désiré. Le traitement s'effectue confortablement, selon le type, en position couchée ou assise. Tout d'abord, la zone à traiter est détendue avec des ondes de choc radiales (AWT) pendant trois minutes. Ensuite, toutes les parties du corps, à l'exception de la zone cutanée à traiter, sont recouvertes de couvertures chaudes. Toutes les procédures sont expliquées. La membrane de protection contre le froid en forme de gel est maintenant placée sur la ou les zones traitées, la tête de traitement sélectionnée y est placée avec une légère pression et la pompe à vide est activée. Le pli peau/graisse est ensuite retiré du corps vers les plaques froides de la tête de applicateur. Le programme de traitement se déroule automatiquement et sans aucune intervention. Après avoir atteint la fin du programme, la pompe à vide s'arrête automatiquement. Ensuite, la zone traitée est légèrement massée et traitée à nouveau avec des ondes de choc radiales pendant trois minutes. Les traitements individuels durent 70 minutes à une température de -8°C à -10°C. En attendant, vous pouvez vous consacrer à la lecture, à la musique ou à Internet.

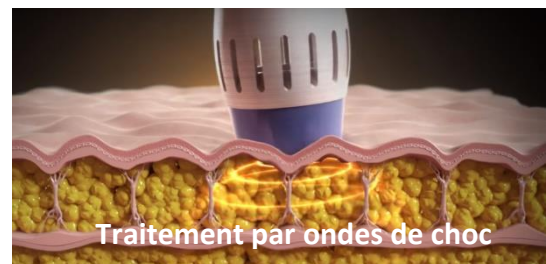

### Massage pendant le traitement

Vous serez dorloté par un massage professionnel, si la position du corps et le temps, en raison de la région traitée, le permettent. Ceci est inclus dans le prix lors de l'année de lancement. Les zones de massage possibles sont : Pieds, jambes, bras, cou et tête (massage indien de la tête).




### Après le traitement

Après le traitement, la zone cutanée est légèrement rouge. De petites ecchymoses peuvent aussi survenir dans de rares cas. Cette rougeur ou ecchymose disparaît automatiquement après quelques heures ou quelques jours. Certains ressentent de légères démangeaisons dans les heures qui suivent. Au cours de la semaine suivante, une légère douleur musculaire est parfois ressentie (sensibilité à la pression). Cela disparaît à nouveau. Dans les jours qui suivent le traitement, la cryothérapie, le sauna et le soleil doivent être évités, sinon aucune restriction n'est nécessaire. Les traitements individuels sont répétés toutes les 4 à 5 semaines au besoin.

### **Méthode de combinaison avec la thérapie par AWT ondes de choc**

Les études scientifiques montrent que l'efficacité du traitement par cryolipolyse est augmentée de 50% par la thérapie par ondes de choc radiales AWT. Ceci est toujours fait immédiatement avant et immédiatement après le traitement. [Seulement disponible chez nous dans cette combinaison et inclus dans le prix.](#)

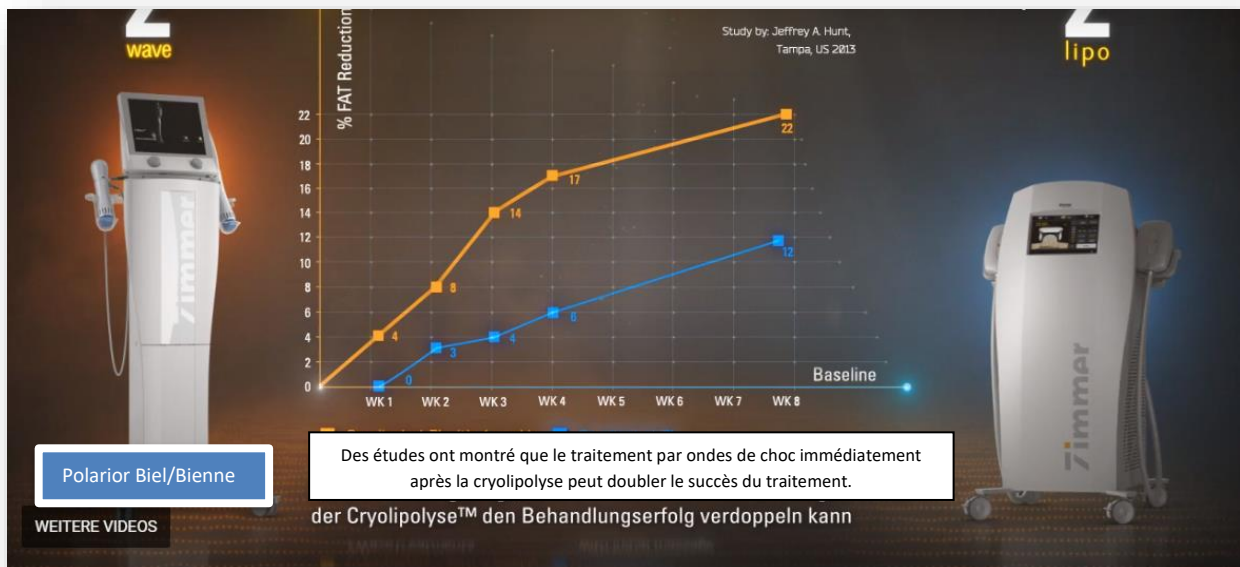

### **Combinaison avec thérapie par le froid corps entière CCE**

De loin les meilleurs résultats sont obtenus en combinaison avec la thérapie par le froid du corps entier CCE. Le CCE, car il a un effet anti-inflammatoire, n'est réalisé qu'une fois par semaine à partir des semaines qui suivent le traitement. Le CCE initie des processus psychosomatiques positifs, détoxifie le corps et accélère le drainage lymphatique naturel. Ceci n'est possible qu'au Polarior à Bienne ! Cette thérapie de soutien supplémentaire n'est pas comprise dans le prix, mais une réduction de prix allant jusqu'à 30% est accordée en combinaison.





Polarior Biel/Bienne

prétraitement - 8 semaines après le traitement		prétraitement - 8 semaines après le traitement	
prétraitement - 8 semaines après le traitement		prétraitement - 8 semaines après le traitement	
prétraitement - 8 semaines après le traitement		gauche : 2 traitements * droite pas de traitement	

Succès visible (pas d'image traitée ou manipulées)

Source: [www.zimmer.de](http://www.zimmer.de)



**Contre-indications (consultation médicale recommandée)**

Grossesse/infirmités, maladies cardiovasculaires, maladies du foie, maladies rénales, tumeurs malignes, diabète, infections, eczéma ou inflammations aiguës dans la zone de traitement, cicatrices hypertrophiques dans la zone de traitement, patients avec stimulateurs cardiaques, prise constante de médicaments, maladies de peau dans la zone de traitement, médicaments anti-inflammatoires.

**Risques et effets secondaires (peuvent survenir dans de rares cas)**

La cryolipolyse est très douce et à faible risque. Après le traitement, des rougeurs, des ecchymoses partielles et une légère sensibilité à la pression ou à la tension apparaissent souvent. Ces effets secondaires disparaissent automatiquement après quelques heures ou quelques jours. Après le traitement, une sensation temporairement réduite ou un durcissement des tissus dans la zone traitée peut également se produire. L'enflure, l'engourdissement local, le sur-froidissement par des brûlures de la peau, des changements temporaires de pigments et des hématomes peuvent également se produire en raison de la pression sous vide. Toutes les activités habituelles peuvent être reprises immédiatement avec un handicap minimal.



**Avant et après le traitement**

Une semaine avant le traitement, il faut éviter les médicaments anticoagulants comme l'aspirine, etc. Si nécessaire, un mini feuillet jetable vous sera fourni. Veuillez apporter des vêtements confortables. Il est également nécessaire d'aller aux toilettes immédiatement avant le traitement et éventuellement de soulager la toux irritable, car le traitement ne doit pas être interrompu. Idéalement, la dégradation des cellules graisseuses est accélérée par un apport calorique contrôlé et beaucoup d'exercice. En plus de la perte de graisse, la cryolipolyse entraîne également un resserrement minimal du tissu sous-cutané. Ceci est également facilité par le traitement ultérieur par AWT ondes de choc.

**Prix en CHF – (jusqu'à 35% de réduction!)**

(Pour des raisons morales, nous n'offrons pas de financement !)

<b>1 traitement :</b>	<b>2 zones simultanément = 450.--</b>	(au lieu de 600.-- = 25% = 150.--)
<b>2 traitements (abo) :</b>	<b>2 x 2 zones = 840.--</b>	(au lieu de 1.200 = 30% = 360.--)
<b>4 traitements (abo) :</b>	<b>4 x 2 zones = 1.560.--</b>	(au lieu de 2.400.-- = 35% = 840.--)

**De plus, 10% de réduction sur la cryothérapie (s'applique uniquement aux abonnements)**

**Que chez Polarior : traitement aux ondes de choc radiales et massage inclus dans le prix !**

**Déclaration de consentement**

Après une explication détaillée, il vous sera demandé de le signer.

**Dates et événements**

Cryolipolyse : du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h, sur rendez-vous seulement

Cryothérapie : en semaine de 11h à 19h, le samedi de 9h15 à 17h (réservation conseillée)

**Informations**

**www.polarior.com, info@polarior.com, Tél: 032 341 30 20, Polarior AG, Tissot Arena, CH-2502 Biel**